

NOU



Border Lock Mouldable

Linguri de amprenta Schreinemakers

plastic rigid

***** adaptabile *****

de unica folosinta



Set introductiv 12 bucati (8 D + 4 E): 160 ron

Lingura Borderlock (**D**entati) - 12 ron/buc

Lingura Borderlock (**E**dentati) - 15 ron/buc

Compas - 50 RON

Sablon - ~~35 ron~~ GRATIS

Disponibile in diverse marimi

Mod de utilizare

Alegeti tipul de lingura in functie de edentatia pacientului (linguri pentru pacienti edentati partial (**D**) sau edentati total (**E**)) si marimea corespunzatoare cu ajutorul compasului special si a sabloanelor.

Pentru a adapta lingura mai bine la campul protetic, aceasta se insereaza in apa fierbinte (la aprox 70 C) timp de 30-60 secunde, pentru a capata o consistenta plastica, maleabila. Lingura se adapteaza cu mana. Mentineti forma minim 5 secunde pentru a se stabili. Verificati adaptarea pe campul protetic, si daca este necesar repetati procedura de adaptare. Clatiti cu apa rece pentru ca lingura sa-si recapete rigiditatea

Transportat & depozitare - evitati expunerea lingurilor de amprenta BorderLock M la temperaturi mai mari de 25 C, pentru a evita riscul deformatiilor

Atentie - Lingurile de amprenta BorderLock M sunt de unica folosinta. Nu recomandam sterilizarea lor cu substante chimice. Nu se pot steriliza in autoclav sau pupinel.