

**DSi 2000****Dental Supply Int 2000**

Str. Constantin Noica, Nr. 165, Sector 6, Bucuresti
J40/231/12.01.2001; CUI 13635560; Capital social: 72.000 RON
BCR, Sucursala Plevnei; IBAN RO60RNCB0071011439930001
Tel. (+4021) 316.41.83; 312.23.16; Tel/Fax. (+4021) 312.23.32
TelVerde 0800 80 90 90; e-mail: office@dsi.ro; Site: www.dsi.ro

Reparare portelan (fara expunerea metalului)

Nota: daca reparatia se face intraoral, este recomandata izolarea cu diga. Aplicati Barrier-Gel pe tesaturile gingivale care ar putea intra in contact cu Porcelain Etchant. Evitati contactul dintre Porcelain Etchant si suprafetele ceramice glazurate, deoarece acestea isi vor pierde luciul.

1. Aplicati Porcelain Etchant 4% pe suprafata de portelan sablata, spalata si uscata, 5-6 minute.
2. Spalati abundent (10 secunde).
3. Uscati cu aer (5 secunde).
4. Aplicati 2 straturi de Porcelain Primer, pentru a trata suprafata si a permite depunerea, timp de 30 secunde, uscati (5 secunde).
5. Aplicati un strat de adeziv One-Step si uscati (5 secunde)
6. Fotopolimerizare 10 secunde.
7. Aplicati compozitul
8. Fotopolimerizati 40 secunde
9. Finisati

Reparare portelan (cu expunerea metalului)

1. **BARRIER GEL** trebuie plasat acolo unde demineralizare nu este necesara.
2. Aplicati **PORCELAIN ETCHANT 4%** pe suprafata uscata pentru 5-6 minute. Pentru a elimina vaporii de acid fluorhidric tineti aspiratorul adiacent cu locul de reparat. 3. Spalati cu o cantitate suficienta pentru a indeparta acidul demineralizant. Uscati.

4. Aplicati un strat subtire de silan, **PORCELAIN PRIMER**, pe suprafata demineralizata, lasati 30 secunde. Uscati

5. Aplicati adeziv ONE-STEP PLUS. Aplicati un singur strat de adeziv pe portelan si pe metal. Uscati foarte bine pentru a evapora solventului. Fotopolimerizare 10 secunde.

Daca metalul este expus: aplicati opacul: amestecati Opaque base cu Opaque catalizator(raport 1:1). Aplicati un strat subtire pe metal. Asteptati 30 secunde, apoi fotopolimerizati 30 de secunde. Se poate aplica inca un strat de adeziv One -Step pe portelan si pe opac. Uscati foarte bine pentru a evapora solventul. Fotopolimerizati 10 secunde.

6. Aplicati compozitul corespunzator. Este indicat un compozit hibrid sau nanocompozit, cum este **Aelite Aesthetic Enamel**. Compozitele cu microumplutura nu sunt recomandate pentru repararea portelanului.

Necesar:

1. PORCELAIN REPAIR KIT : 1 Bottle Porcelain Primer (3ml), 1 Bottle Porcelain Etchant (HF) (3ml), 1 Syringe Barrier Gel (5g), 1 Bottle OPAQUER Catalyst (3ml), 1 Bottle OPAQUER Base Universal

2. Adeziv ONE STEP